

STERLINK

7 minutový nízkoteplotní plazmový sterilizátor



STERLINK



Rychlá sterilizace za 7 min



Kompaktní design



Snadné ovládání



Sledování v reálném čase



Chytrá sterilizace



Kazety na sterilant, spotřební materiál a příslušenství

※ Kazety na sterilant



STERPACK™

- Velikost: 135 x 280 mm
- 50 ks/box



STERPACK™ Plus

- Velikost: 250 x 410 mm
- 30 ks/box



STERLOAD™

- 30 ks/box



STERLOAD™ MINI

- 30 ks/box

※ Spotřební materiál



Tyvek® 100

- Velikost: 100 x 400 mm
- 120 ks/box



Tyvek® 200

- Velikost: 200 x 400 mm
- 90 ks/box



Tyvek® 300

- Velikost: 300 x 400 mm
- 60 ks/box



Sterilizační obal

- Velikost: 60 x 60 mm
- 50 ks/box

Příslušenství



STERSEAL™

- Velikost: 505 x 255 x 145 mm
- Hmotnost: 12 kg
- Teplota: 135 °C / 150 °C



Vozík

- Velikost: 483 x 660 x 603 mm
- Hmotnost: 37 kg



Tiskárna štítků

- Velikost: 120 x 102 x 146 mm
- Hmotnost: 0,5 kg



Rolička se štítky

- Rozměr: 52 x 110 mm
- Počet štítků: 49 ks

※ Příslušenství

Box



Cl páska

- Šířka: 20 mm
- Délka: 50 m



Cl proužky

- Velikost: 18 x 105 mm
- 250 ks/box



BI

- Čas: 30 min
- 50 ks/box



STERPACK™ Tray

- Velikost: 195 x 80 x 30 mm



STERPACK™ Plus Tray

- Velikost: 260 x 160 x 50 mm

※ Jen na jedno použití

※ Tyvek® je registrovanou obchodní známkou společnosti Dupont™.

STERPACK™ & STERLOAD™

Zdravotnický prostředek třídy IIb s certifikací CE, Health Canada a TGA



Pouch mód – rychlá 7minutová sterilizace v kapsách s přímým vstřikováním a s patentovanou sterilizační technologií, použitou poprvé na světě



Díky kapsám s vakuovým uzávěrem může obsluha okamžitě kontrolovat proces sterilizace nástrojů uvnitř



Kazety se sterilizačním činidlem pro bezpečnou likvidaci

Specifikace přístroje STERLINK™ FPS- 15s Plus

Model	Mode	Cycle time	Capacity	Sterilant
STERLINK™ FPS-15s Plus	Pouch mód	STERPACK™: 7 min	1 l	H ₂ O ₂ 58%-59,5% (0,1 ml/buňka)
	Pouch Plus mód	STERPACK™ Plus: 14 min	4 l	H ₂ O ₂ 58%-59,5% (0,3 ml/buňka)
	Komorový mód	STERLOAD™: 36 min	14 l	H ₂ O ₂ 58%-59,5% (0,9 ml/buňka)

* STERPACK™, STERPACK™ Plus a STERLOAD™ jsou certifikovaná sterilizační činidla s označením CE, Health Canada a TGA.

Specifikace přístroje STERLINK™ MINI

Model	Mode	Cycle time	Capacity	Sterilant
STERLINK™ MINI	Pouch mód	STERPACK™: 7 min	1 l	H ₂ O ₂ 58%-59,5% (0,1 ml/buňka)
	Expresní mód	STERLOAD™ MINI: 12 min	7 l	H ₂ O ₂ 58%-59,5% (0,7 ml/buňka)
	Pokročilý mód	STERLOAD™ MINI: 18 min		

* Expresní mód znamená proces povrchové sterilizace; ostatní módy znamenají proces hloubkové sterilizace.

* Všechny sterilizační procesy STERLINK™ jsou dvojité cykly.

Přístroj STERLINK™ provádí verifikaci výsledků sterilizace pomocí následujících lumenů:

Pro STERLINK™ je vyžadován **jednokanálový lumen**

ø 0,7 x 500 mm nerezová ocel | ø 2,0 x 1500 mm nerezová ocel | ø 1,0 x 2000 mm PTFE

Expresní mód (jen verze STERLINK™ MINI) – 12minutová rychlá sterilizace

Je aplikován proces sterilizace s dvojitým cyklem v souladu s normou ISO 14937



Kompatibilní s většinou zdravotnických prostředků
a materiálů, které jsou citlivé na vysokou teplotu a vlhkost



Jednoduchá obsluha, instalace i monitorování
(vyžaduje jen elektrickou zásuvku)




Výsledky sterilizace

Přístroj STERLINK™ provádí verifikaci výsledků sterilizace pomocí následujících lumenů:

Pro STERLINK™ je vyžadován **jednokanálový lumen**


- Ø 0,7 x 500 mm nerezová ocel
- Ø 2,0 x 1500 mm nerezová ocel
- Ø 1,0 x 2000 mm PTFE

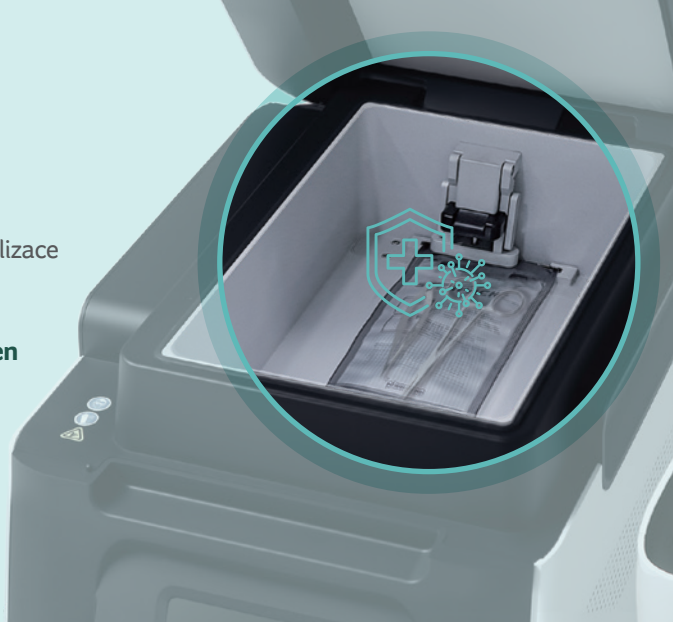

Systém pro sledování nástrojů (ITS™)

Sledování nástrojů pomocí čárového kódu

- Monitorování přístroje STERLINK™ v reálném čase
- Vzdálené provádění nejnovějších aktualizací softwaru

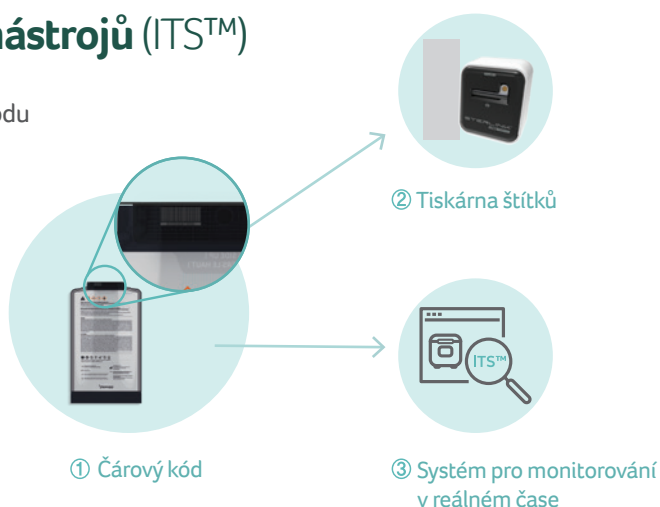

Srovnávací tabulka

Sterilizátor	Teplota	Doba cyklu	Sterilant	Vlastnosti	
Autokláv	Do 134 °C	60 min +1 hod. chlazení	Horká pára	• Sterilizace látek • Dlouhá doba cyklu	• Riziko spálení • Riziko poškození lékařských nástrojů
Etylenoxid	Do 60 °C	Přes 120 min +12 hod. ventilace	Etylenoxid	• Vysoce nebezpečný toxický plyn • Dlouhá doba cyklu	
Plazmový sterilizátor	Do 60 °C	70 min	H ₂ O ₂	• Vysoká cena • Velký objem	• Dodatečná ventilace • Nižší efektivita
STERLINK®	Do 60 °C	Pouch mód: 7 min Pouch Plus mód: 14 min Komorový mód: 36 min	H ₂ O ₂ přímé vstříkávání	• Rychlý sterilizační cyklus • Příznivé náklady • Kompaktní velikost • Ergonomický design	• Snadná údržba • Systém ITS™ • Ekologicky příznivý • Bezpečnost pro nástroje citlivé na teplo

Nízkoteplotní plazmový sterilizátor pro široké spektrum lékařských nástrojů

Přístroj používá světově první **patentovanou sterilizační technologii** kapsového typu s přímým vstřikováním. Je validován na **hladinu sterilizační jistoty SAL 10^{-6}** a zajišťuje tak sterilizační stabilitu lékařských nástrojů.

(SAL: Hladina sterilizační jistoty, 99,9999 %)



STERLINK Specifikace



Model	STERLINK™ FPS-15s Plus		STERLINK™ MINI	
Rozměry (š x h x v)	433 x 614 x 437 mm		275 x 440 x 330 mm	
Komora (š x h x v)	264 x 410 x 125 mm (14 l)		206 x 346 x 113 mm (7 l)	
Diagonální délka komory	47 cm		36 cm	
Vakuová pumpa	Pumpa vestavěného typu		Pumpa samostatného typu	
Hmotnost	67 kg		20 kg (modul s pumpou: 21 kg)	
Délka cyklu	Pouch mód	STERPACK™: 7 min	Pouch mód	STERPACK™: 7 min
	Pouch Plus mód	STERPACK™ Plus: 14 min	Expresní mód	STERLOAD™ MINI: 12 min
	Komorový mód	STERLOAD™: 36 min	Pokročilý mód	STERLOAD™ MINI: 18 min

* Expresní mód znamená proces povrchové sterilizace; ostatní módy znamenají proces hloubkové sterilizace.

* Všechny sterilizační procesy STERLINK™ jsou dvojité cykly.



sales@plasmapp.com
www.plasmapp.com
KJ-P-0001-2108-R0.4

Videris s.r.o.

Shiran Tower | Lužná 716/2 | 160 00, Praha 6
Tel: +420 226 220 866 info@videris.cz

*plasmapp

 **Videris®**